



# *My* FILLER

NEW LIFE TO THE SKIN



DERMAL FILLERS

## PROFESSIONELL, NATÜRLICH, QUALITÄT

Herr Roberto Caldeira, der Gründer von My Med, hatte eine Vision und träumte 2017 groß. Er wollte eine einzigartige und professionelle Marke von Hautfillern aus 100 % natürlichen Inhaltsstoffen schaffen, indem er die Konzepte von natürlicher Schönheit und „slow Aging“ auf ein höheres Niveau bringt. Diese Vision wurde Wirklichkeit und die Erfolgsgeschichte der ersten Marke von My Med, My Filler, ist seitdem ungebrochen. Die sechs Produkte der Marke Dermal Filler sind weltweit bekannt und beliebt und mittlerweile in fast 50 Ländern auf dem Markt der ästhetischen Filler vertreten. Einige Jahre nach der Gründung wurde in Absprache mit Spezialisten My Filler Revitalize geschaffen, eine weitere Mesotherapie-Produktlinie von My Med. Es gab viele Anerkennungen und internationale Auszeichnungen, die den Weg seitdem begleitet haben.

„Unsere äußere Schönheit und unser Glanz existieren und atmen in enger Einheit mit unserer inneren, spirituellen Welt, denn es gibt keine innere Harmonie ohne äußere Harmonie und umgekehrt“

“Wir glauben an die Kraft der natürlichen Schönheit und die Bedeutung der Stärkung des Selbstbewusstseins und versuchen dies mit all unseren Produkten und Entwicklungen so weit wie möglich zu fördern. Das ist unsere Mission und unser Credo, das wir vertreten.“





## WISSENSCHAFTLICHE INNOVATION

**My Filler**, die einzigartige Familie von dermalen Fillern, umfasst sechs verschiedene Formeln mit zwei verschiedenen Technologien (**TRIO** und **Dual Link**), die alle von einer international anerkannten benannten Stelle in Italien CE-zertifiziert sind.

In den Soft-, Medium- und Strong-Produkten auf Basis der **TRIO-Technologie** wird die spezifische Hyaluronsäurekonzentration mit unterschiedlichen Vernetzungsraten und Molekülgrößen in einer speziellen Herstellungsumgebung kombiniert. Als Ergebnis erhält man drei Füllstoffe mit stark unterschiedlichen Eigenschaften, was eine breite Anwendbarkeit ermöglicht.

Hohe Zufriedenheit auf Kunden- und Anwenderseite!

- Mit dieser Komposition lassen sich alle gewünschten ästhetischen Ergebnisse erzielen, nichts ist unmöglich
- hohe hydrophile Kapazität
- einfach zu formen
- langanhaltende Wirkung
- Stabilität nach Injektion



# My FILLER

# SOFT



## FEINE LINIEN – ALLGEMEINE HYDRATATION

Der Hyaluronsäure-Filler **My Filler Soft** empfiehlt sich für Situationen, in denen die zu behandelnde Stelle eine leichte Volumenzunahme, die Beseitigung feiner Fältchen und eine Hydratation benötigt. Es kann auch verwendet werden, um den Teint des Gesichts aufzuhellen, ein gesundes Aussehen zu erhalten und die Bildung von Falten zu verzögern.

- **Empfohlene Injektionstiefe:** obere Dermis
- **Empfohlene Bereiche:** Periorbital, Augenringe, Perioral, Raucherfalten, natürlich aussehende – hydratisierte Lippen
- **Weitere Eigenschaften:** extrem niedrige Viskosität, daher auch problemlos bei verschiedenen Mesotherapie-Techniken einsetzbar



CE 0373




**My Filler Soft** wird mit der **TRIO-Technologie** hergestellt und hat die kleinste HA-Konzentration im My Filler-Sortiment, nur 20 mg/ml. Es hat eine sehr niedrige Viskosität, was es extrem einfach macht, es mit einer 27-G- oder 30-G-Nadel zu injizieren.


### Empfohlener Injektionsbereich:



### Empfohlene Injektionstechnik:

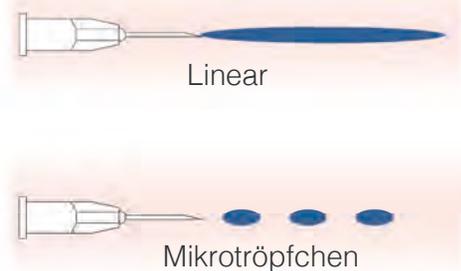

### Empfohlene Injektionsnadel:

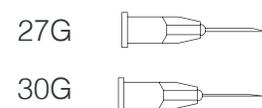

Code	HA Konzentration	HA Typ	Vernetzungsmittel	Vernetzungsrate	Partikelgröße
MYF001	20 mg/ml	Monophasisch	BDDE	1,5	80

**Die Packung My Filler Soft enthält:** 1 sterile Fertigspritze mit 1 ml, 2 Kanülen 27G 1/2", 2 Produktetiketten, 1 mehrsprachige Gebrauchsanweisung, 1 Patientenkarte.

# MEDIUM

## MEDIUM VOLUME – DER MEISTER DER ENERGETISCHEN HYDRATION

Dank seiner universellen Anwendungseigenschaften hat sich **My Filler Medium** zu einem der beliebtesten Produkte aus dem My Filler Produktportfolio entwickelt. Es kann perfekt verwendet werden, wenn das Ziel ist, im behandelten Bereich ein mittleres Volumen und eine energetische Hydratation zu erreichen.




- **Empfohlene Injektionstiefe:** mittlerer Teil der Dermis
- **Empfohlene Bereiche:** Nasolabialfalten, Mentolabialfalten (Marionettenfalten), Glabella und Lippenvolumenzunahme
- **Weitere Merkmale:** Einfaches Injizieren dank ergonomisch geformter Spritze, komfortablem Kolbenkopf und mittlerer Viskosität des Materials



**My Filler Medium** wird mit der **TRIO-Technologie** hergestellt und hat eine Konzentration von 25 mg/ml an monophasischer HA. Es hat eine mittlere Viskosität, die zur Injektion mit einer 27-G-Nadel oder -Kanüle geeignet ist. Für My Filler Medium Filler eignen sich mehrere Techniken wie Linien-, Punkt- oder Kreuzschraffur.


### Empfohlener Injektionsbereich:

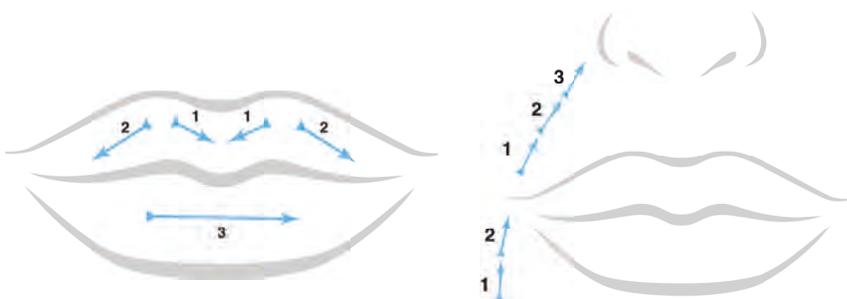

### Empfohlene Injektionstechnik:



### Empfohlene Injektionsnadel:

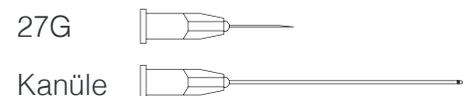

Code	HA Konzentration	HA Typ	Vernetzungsmittel	Vernetzungsrate	Partikelgröße
MYF002	25 mg/ml	Monophasisch	BDDE	2,5	100

**Die Packung My Filler Medium enthält:** 1 sterile Fertigspritze mit 1 ml, 2 Nadeln 27G 1/2", 2 Produktetiketten, 1 mehrsprachige Gebrauchsanweisung, 1 Patientenkarte.

# STRONG

## INNOVATIV – DER EXPERTE FÜR VOLUMENSTEIGERUNG

Aufgrund seiner hohen HA-Konzentration ist der **My Filler Strong** einzigartig in der Welt der Hyaluronsäure-Filler. Besonders empfohlen für Konturierungen und großvolumige Korrekturen.

- **Empfohlene Injektionstiefe:** von der tiefen Dermis bis zum Periost
- **Empfohlene Bereiche:** Kinn, Kieferpartie, Nase und mittlerer Gesichtsbereich
- **Weitere Eigenschaften:** Es hat eine extrem hohe Viskosität und hervorragende Formbarkeitseigenschaften. Nach der Injektion bleibt das Material in dem Bereich stabil, wodurch jede Art von unerwarteter Migration in andere Bereiche vermieden wird




**My Filler Strong** ist einzigartig in seiner Art. Es wird mit der **TRIO-Technologie** hergestellt und hat die außergewöhnliche HA-Konzentration von 30 mg/ml. Es hat eine sehr hohe Viskosität und kann dennoch problemlos durch Nadeln und Kanülen - 25G, 26G und 27G - geleitet werden.

### Empfohlener Injektionsbereich:




### Empfohlene Injektionstechnik:

Linear, Mikrotröpfchen

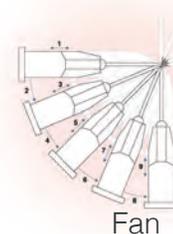

### Empfohlene Injektionsnadel

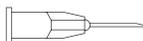25G - 27G 

Kanüle 

Code	HA Konzentration	HA Typ	Vernetzungsmittel	Vernetzungsrate	Partikelgröße
MYF003	30 mg/ml	Monophasisch	BDDE	3,5	140

**Die Packung My Filler Strong enthält:** 1 sterile Fertigspritze mit 1 ml, 2 Kanülen 27G 1/2", 2 Produktetiketten, 1 mehrsprachige Gebrauchsanweisung, 1 Patientenkarte.



## SOFORTIGE UND LANGLEBIGE ERGEBNISSE

Es ist eine bekannte Tatsache, dass „Standard“-Filler länger brauchen, um das gewünschte Endergebnis zu erzielen. Die vernetzte HA benötigt mehr Zeit, um sich im gewünschten Bereich niederzulassen und sich mit den Wassermolekülen zu verbinden. Der Prozess dauert 5-7 Tage, abhängig vom Patienten.

Lineare (nicht vernetzte, auch als biorevitalisierende Hautverstärker bezeichnete) Materialien haben nach der Injektion eine sehr kurze Lebensdauer, sie werden dank der körpereigenen Hyaluronidase-Enzyme schnell abgebaut. Seine Wirkung besteht darin, dass es sofort mit Wassermolekülen in Kontakt kommt und dadurch eine brillant hydratisierte Wirkung erzeugt. Lineare Hyaluronsäure wird innerhalb von 5-7 Tagen vollständig abgebaut.

Als Ergebnis jahrelanger Entwicklung und Beratung mit Fachärzten und Patienten ist die **DUAL Link Technologie** entstanden, die eine Lösung für die Wünsche der meisten Fachärzte und Patienten bietet: Das erzielte Ergebnis ist nicht nur langanhaltend, sondern sofort sicht- und fühlbar!

Wenn der Traum von Patienten und Fachleuten wahr wird!

Die **DUAL-Link-Technologie** kombiniert die Vorteile von linearem und vernetztem HA und die Vorteile beider Technologien in einer einzigartigen Produktlinie. Die spezielle Linie mit **DUAL-Link-Technologie** bietet eine sofortige Wirkung dank der nicht quervernetzten Technologie sowie ein lang anhaltendes Ergebnis aufgrund der quervernetzten HA, was die Patientenzufriedenheit sicherstellt und dem Arzt Zeit spart, indem er zukünftige Korrekturen vermeidet.



# HA Refill



## SKINBOOSTER, AUF EINEM NEUEN LEVEL


Das Konzept der Skinbooster ist sehr einfach, aber sehr effektiv. Unsere Experten haben beschlossen, den **Skinbooster** auf ein neues Level zu heben. Neben der quervernetzten Hyaluronsäure wurde mit dem Skinbooster auch unvernetzte Hyaluronsäure zur Erhöhung des Feuchthaltefaktors ergänzt. So wird unsere beliebte **Dual-Link-Technologie** mit der Herstellung dieses Skinboosters verbunden, sodass die Patienten ihre sofortige Wirkung sehen können.

- **Das Ergebnis:** ein hydratisierter, strahlend aussehender und ebenmäßig strukturierter Teint, der länger hält, erhöhte Wirksamkeit
- **Empfohlene Bereiche:** der gesamte Bereich des Gesichts
- **Weitere Eigenschaften:** niedrige Viskosität




**My Filler HA Refill** wird mit der **DUAL-Link-Technologie** hergestellt und enthält eine Konzentration von 18 mg/ml monophasischer vernetzter HA und 2 mg/ml monophasischer unvernetzter HA. Es hat eine sehr niedrige Viskosität, die zur Injektion mit einer 27-G- oder 30-G-Nadel oder einem Hyaluron-Stift geeignet ist.


Es wurde bewiesen, dass monophasische Filler nicht wie biphasische Filler in das Gewebe wandern. Dies trägt dazu bei, hervorragende Ergebnisse genau dort zu erzielen, wo der Kunde sie benötigt.

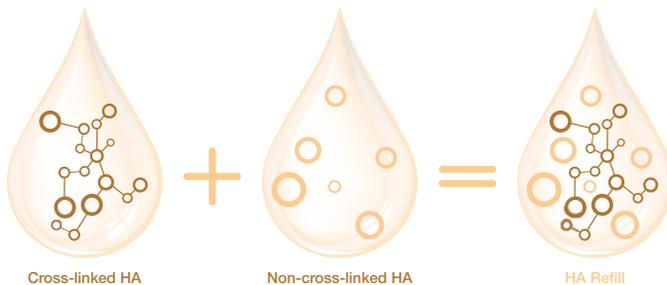

### Empfohlene Injektionstechnik:

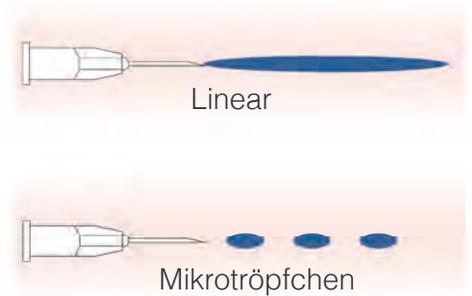

### Empfohlene Injektionsnadel:

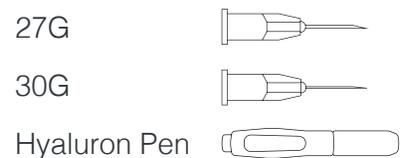

Code	HA Konzentration	HA Typ	Vernetzungsmittel	Vernetzungsrate	Partikelgröße
MYF107	18 + 2 mg/ml	Monophasisch	BDDE	1,5	80

**Die Packung My Filler HA Refill enthält:** 1 sterile Fertigspritze mit 1 ml, 2 Kanülen 27G 1/2", 2 Produktetiketten, 1 mehrsprachige Gebrauchsanweisung, 1 Patientenkarte.


# GLIPS

## LANGLEBIG LEUCHTENDE LIPPEN


My Filler Glips ist das erste Produkt der My Filler-Reihe, das vollständig und ausschließlich für Lippenbehandlungen wie Volumen und Konturierung bestimmt ist. Diese speziell zusammengestellte Formel wurde unter Berücksichtigung der folgenden einzigartigen Eigenschaften erstellt: biologisch, Farbe, Form und Volumen.



- **Das Ergebnis:** sofortiger und langanhaltender Glanz, volle Lippen
- **Weitere Eigenschaften:** mittlere Viskosität

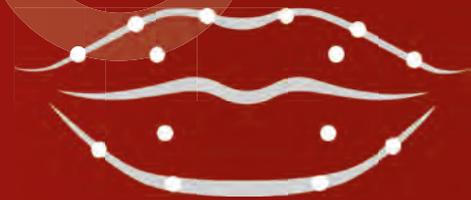


Hergestellt unter Verwendung der **DUAL-Link-Technologie**, hat **My Filler Glips** eine Konzentration von 20 mg/ml monophasischer vernetzter HA und 5 mg/ml monophasischer unvernetzter HA. Es hat eine mittlere Viskosität, die zur Injektion mit einer 27-G-Nadel oder -Kanüle geeignet ist. Mehrere Injektionstechniken sind für den Filler Glips geeignet wie die Linear- oder Punkttechnik.

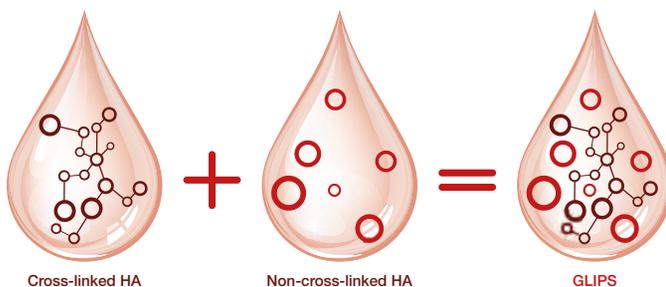

### Empfohlene Injektionstechnik:



### Empfohlene Injektionsnadel:

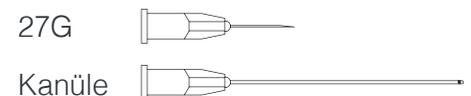

Code	HA Konzentration	HA Typ	Vernetzungsmittel	Vernetzungsrate	Partikelgröße
MYF105	20 + 5 mg/ml	Monophasisch	BDDE	2	100

**Die Packung My Filler Glips enthält:** 1 sterile Fertigspritze mit 1 ml, 2 Kanülen 27G 1/2", 2 Produktetiketten, 1 mehrsprachige Gebrauchsanweisung, 1 Patientenkarte.

# Man Max




## SPEZIELLE FÜLLSTOFFE FÜR MÄNNER

Die spezielle Formel von **My Filler Man Max** wurde unter Berücksichtigung der biologischen und strukturellen Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Haut entwickelt. Neben der Stärke der Gesichtsbehaarung können wir noch weitere Unterschiede entdecken.

- **Das Ergebnis:** ein maskulinere Aussehen, eine kräftige Kinnpartie und eine gut definierte Form und Volumen.
- **Empfohlener Injektionsbereich:** Kinn, Kiefer, Nase und Mittelgesichtsbereich




**My Filler Man Max** wird mit der **DUAL-Link-Technologie** hergestellt und enthält eine Konzentration von 25 mg/ml monophasischer vernetzter HA und 5 mg/ml monophasischer unvernetzter HA. Es hat eine hohe Viskosität, die zur Injektion mit einer 25G-, 26G- und 27G-Nadel oder -Kanüle geeignet ist. Mehrere Injektionstechniken eignen sich für My Filler Man Max, wie z. B. lineare, Punkt-, Fächer- oder Kreuzschraffurtechniken.

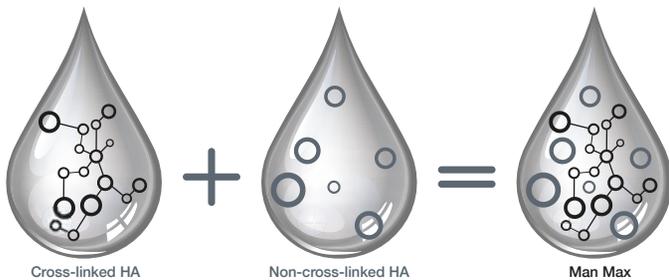


### Empfohlene Injektionstechnik:

Linear, Mikrotröpfchen

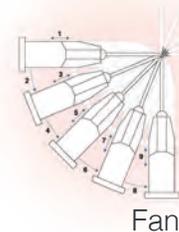

### Empfohlene Injektionsnadel:

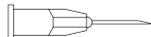
25G - 27G 

Kanüle 

Code	HA Konzentration	HA Typ	Vernetzungsmittel	Vernetzungsrate	Partikelgröße
MYF004	25 + 5 mg/ml	Monophasiisch	BDDE	3	120

**Die Packung My Filler Man Max enthält:** 1 sterile Fertigspritze mit 1 ml, 2 Kanülen 27G 1/2", 2 Produktetiketten, 1 mehrsprachige Gebrauchsanweisung, 1 Patientenkarte.



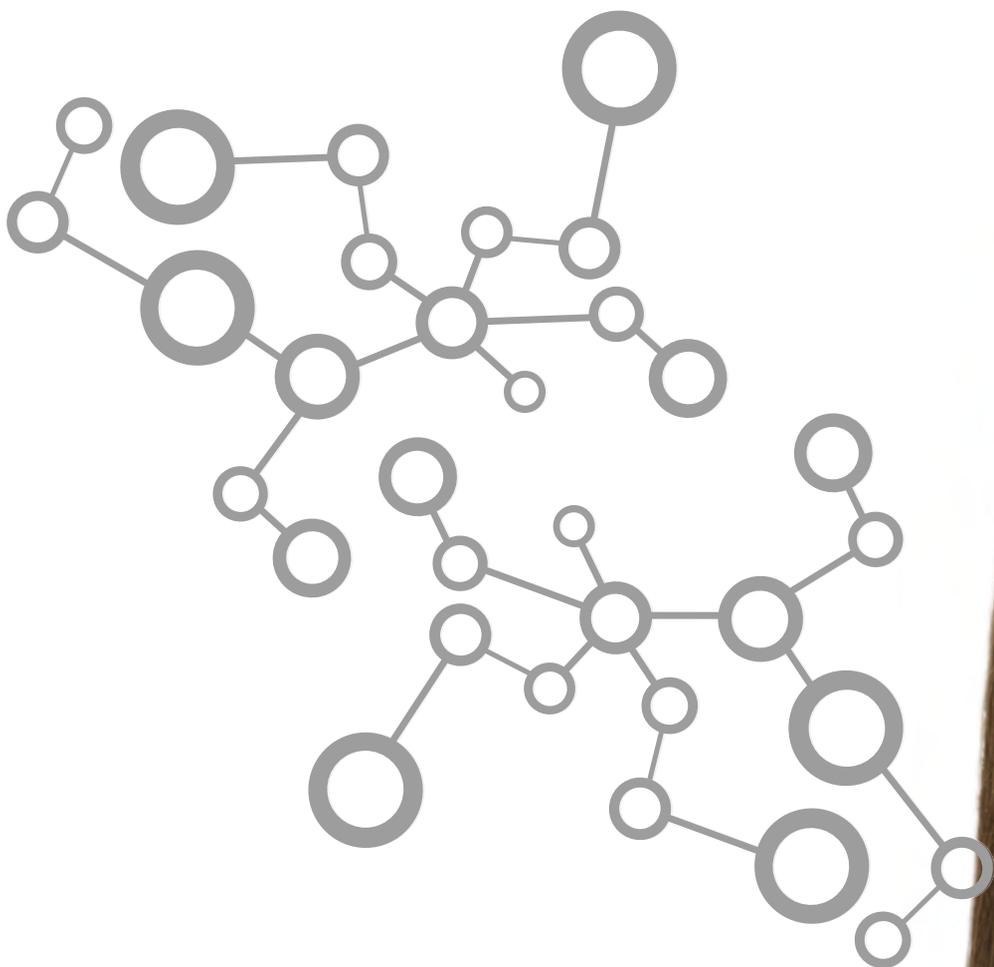

TRICONmed GmbH  
An der Eiche 6  
34327 Körle  
T 05665 40 75 80  
F 05665 40 75 888  
info@triconmed.de  
[www.triconmed.de](http://www.triconmed.de)