

## Narbenbehandlung und Narbenpflege


- + ScarSil
- + ScarEsthetique
- + ScarFX
- + Oleeva Fabric
- + Oleeva Foam



# Die Haut, Verletzungen & Wundheilung

## Die Haut

Die Haut ist unser größtes Organ. Eine ihrer zahlreichen Funktionen ist es, unseren Körper vor äußeren Einflüssen zu schützen, unsere Körpertemperatur zu regulieren und uns selbst wahrzunehmen. Die Haut ist gut durchblutet, von empfindlichen Nerven durchzogen und beinhaltet unter anderem Haarfollikel und pflegende Talgdrüsen.

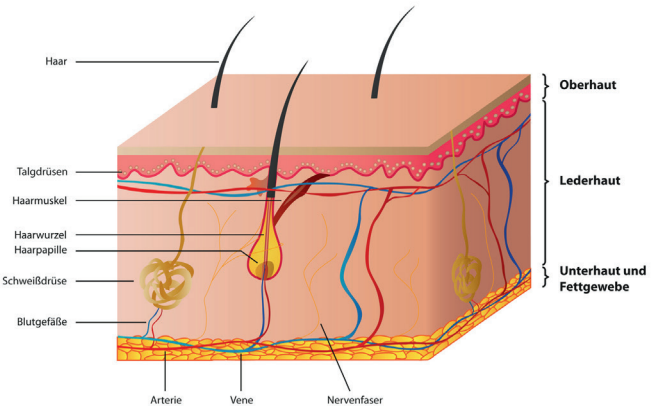

## Was passiert nach einer Verletzung oder einer OP?

Bei einer Verletzung reagiert die Haut mit sofort einsetzenden Reparaturprozessen. Durch die Verletzungen von Blutgefäßen tritt Blut aus der Wunde aus. Die Wunde wird mit einem Blutpfropf verschlossen. Später wird diese dann durch körpereigenes Gewebe aufgefüllt und verschlossen. In der Regel erfolgt dies innerhalb weniger Tage, sodass keine Keime in unseren Körper eindringen können.

## Entscheidend bei der Wundheilung ist die Tiefe der Verletzung

Bei oberflächlichen Verletzungen ist die Haut in der Lage, eine vollständige Reparatur durchzuführen. Die Wunde heilt narbenfrei ab. Bei tiefen Verletzungen oder auch Operationen wird eine Wunde – auch bei einem dünnen Operationsschnitt – immer mit Ersatzgewebe, dem sogenannten Narbengewebe, aufgefüllt und verschlossen. In diesem Narbengewebe sind viele Kollagenfasern enthalten, die dem Narbengewebe Festigkeit verleihen. Je nach persönlicher Veranlagung kann es sein, dass dabei zu viele Kollagenfasern gebildet werden.

## **Narbenbehandlung**

Selbst eine kleine Operationsnarbe hinterlässt unter Umständen eine dicke und über Hautniveau ragende Narbe. Man nennt diese Form „hyperthrophe“ Narbe.

Bei großflächigen oder tiefen Verletzungen, zum Beispiel durch Schürfwunden oder Verbrennungen, kommt hinzu, dass es dem Körper ohne Hilfestellung schwerfällt, die zur Festigung benötigten Kollagenfasern gleichmäßig im Narbengewebe anzuordnen. Dadurch kann eine wellige oder zerklüftete Narbenoberfläche entstehen.

Verschlimmert wird diese Situation im zweiten Schritt, indem der Körper versucht, die Narbe so klein wie möglich werden zu lassen. Diese Narbenschrumpfung kann bei Narben, die über ein Gelenk reichen, dazu führen, dass das Gelenk nicht mehr vollständig gestreckt werden kann.

Die Folge ist dann eine nicht nur im kosmetischen Sinne „unansehnliche“ Narbe, sondern auch eine körperliche Funktionseinschränkung.

Der Prozess bis zur Narbenreife kann bis zu zwei Jahren dauern.



# Narbenbehandlung

## **Möglichkeiten zu Vermeidung und Behandlung „unansehnlicher“ oder funktionseinschränkender Narben**

Aus jahrzehntelanger Erfahrung ist bekannt, dass sich Silikonprodukte sehr positiv auf die Narbenreifung auswirken. Die Wirkung der Silikonpflaster und Silikongele wird nicht durch die Abgabe von Inhaltsstoffen an die Haut erreicht, sondern über den absoluten Luftabschluss über der Narbe. Durch den Abschluss der Haut wird hier die Temperatur erhöht. Die erhöhte Temperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Neuausrichtung der Kollagenfasern und der Heilung des Gewebes. So entsteht eine weichere, flachere und blässere Narbe.

## **Vorbeugende Narbenbehandlung**

Die Behandlung mit Silikonpflastern und Silikongel kann unmittelbar nach Wundheilung erfolgen. Damit wird die Neigung, wulstige Narben zu bilden, spürbar gemildert. Auch das frühzeitige Verschwinden von Rötungen und Juckreiz wird durch die Silikonbehandlung unterstützt.

## **Korrigierende Narbenbehandlung**

Auch wenn sich schon eine wulstige Narbe gebildet hat oder bei großflächigen Verletzungen ein unruhiges Narbenbild entstanden ist, kann eine Silikonbehandlung dazu beitragen, die Situation zu verbessern.

Die Silikonbehandlung hilft dem Körper, die Kollagenfasern gleichmäßiger auszurichten und durch sanften Druck zu viel eingelagertes Kollagen wieder abzubauen. Eine Narbe spricht solange auf die Behandlung an, bis nach etwa zwei Jahren die Narbenreife vollständig eingetreten ist.

## **Zusätzliche Narbenkorrekturen**

Bei großflächigen Narben kann es sinnvoll sein, zusätzlich eine Narbenkompressionsbehandlung durchzuführen, die dann vom behandelnden Arzt verordnet wird.

In einzelnen Fällen können operative Narbenkorrekturen oder medikamentöse Behandlungen erforderlich sein. Durch eine frühzeitige konsequente Narbenbehandlung können solche Narbenkorrekturen in der Regel vermieden werden.

# Produkte zur Narbenbehandlung

Unsere Produkte für Ihre Narbenbehandlung:

## **ScarSil®**

Silikon-Narbengel

## **ScarEsthetique®**

Narbenpflege und Aufheller

## **ScarFX®**

Selbsthaftendes, transparentes Silikon-Narbenpflaster

## **Oleeva Fabric®**

Textilbeschichtetes Silikon-Narbenpflaster

## **Oleeva Foam®**

Schaumstoffbeschichtetes Silikon-Narbenpflaster



## ScarSil®

Silikon-Narbengel

*ScarSil® ist eine unsichtbare und leicht anzuwendende Alternative zum Silikon-Narbenpflaster.*

### **Merkmale:**

- + hinterlässt einen luftdichten, dünnen und flexiblen Film auf der Narbe
- + zieht schnell ein und ist wasserfest
- + ist transparent, geruchlos und klebt nicht
- + trägt zur Aufrechterhaltung des Feuchtigkeitshaushalts der Haut bei
- + auch für Kinder empfohlen
- + ideal für empfindliche Haut

ScarSil® enthält keinen Wirkstoff, der an den Körper abgegeben wird. Die Wirkung beschränkt sich ausschließlich auf den lokalen Effekt an und auf der Narbe. Nach dem Einziehen können Kosmetika und Sonnenschutzmittel über ScarSil® aufgetragen werden.

Das Silikon-Narbengel hilft der Entwicklung hypotropher Narben vorzubeugen. Auch bestehende Narben werden bei positivem Therapieverlauf geschmeidig, weich, weniger erhaben und verlieren zunehmend die intensive Rötung.

Geeignet für Narben auf allen beweglichen Gelenken, im Gesicht und überall dort, wo ein Narbenpflaster stört.



## ScarEsthetique®

Narbenpflege und Aufheller

*ScarEsthetique® kombiniert die narbenmildernde Eigenschaft eines Silikongels mit der unterstützenden Wirkung von Vitaminen, Antioxidationsmitteln und entzündungshemmenden Substanzen und wirkt aufhellend.*

### Merkmale:

- + hellt überpigmentierte, dunkle Narben und Hautstellen auf
- + hilft Rötung und Juckreiz zu minimieren
- + wirkt abschwellend und entzündungsmindernd
- + reguliert den Narbenstoffwechsel
- + unterstützt den Reifeprozess der Narbe

Der Bildung von deutlich sichtbaren und störend dicken Narben kann mit ScarEsthetique® erfolgreich vorgebeugt werden.



## ScarFX®

Selbsthaftendes, transparentes Silikon-Narbenpflaster

*ScarFX® Silikon-Narbenpflaster ist effektiv bei hypertrophen Narben, bei Verbrennungsnarben sowie bei Narben durch Unfallverletzungen und nach operativen Eingriffen wie Kaiserschnitt und kosmetischen Operationen.*

### Merkmale:

- + weich und flexibel, schmiegt sich der Haut und der Narbe an
- + kann nach dem Abheilen der Wunde verwendet werden
- + bietet optimalen Komfort und ist leicht anzuwenden
- + selbsthaftend und transparent
- + wiederverwendbar, haltbar und kostengünstig

ScarFX® ist ein effektives Mittel zur Glättung der Narbenoberfläche. Das Produkt ist eine hochwertige, medizinische Silikonfolie, die bei der Unterstützung des Selbstheilungsmechanismus eine entscheidende Rolle spielt. Der wasser- und luftdichte Abschluss der Haut, der durch die hochreine, okklusive Silikonfolie im Bereich der verletzten Stelle erzeugt wird, erhöht lokal die Hauttemperatur. Die erhöhte Temperatur spielt eine wichtige Rolle bei der Neuausrichtung der Kollagenfasern und der Regeneration des Bindegewebes. Dies trägt zur Bildung einer weicheren, flacheren und blasseren Narbe bei, die kosmetisch ansprechender ist.



Silikonstreifen



### Einzigartige Formen für viele Anwendungsbereiche

Die einzigartige Vielfalt der angebotenen Formen gewährleistet eine passgenaue Versorgung vieler postoperativer Indikationen, wie z. B.:

- + allgemeine chirurgische Verfahren
- + Brustvergrößerungen & -reduktionen
- + Kaiserschnitt
- + Abdominoplastik (Bauchstraffung)

Aber auch individuelle Formate können aus dem rechteckigen Pflaster mühelos passgenau zugeschnitten werden.

Mit der Anwendung des Pflasters kann sofort nach vollständigem Wundverschluss, dem Ziehen der Fäden und dem Entfernen der Klammern und Wundnahtstreifen begonnen werden. Die Schutzfolie auf beiden Seiten entfernen und die haftende Seite auf die trockene, nicht eingecremte Haut aufbringen. Das Pflaster sollte die Narbe an allen Seiten mindestens um einen Zentimeter überragen. ScarFX® sollte wenigstens 10 - 12 Stunden getragen werden, besser jedoch rund um die Uhr. In diesem Fall, wird eine Wechselversorgung mit zwei Streifen ScarFX® empfohlen. Außerdem sollte das Pflaster einmal täglich mit nicht rückfettender Seife gereinigt werden.

#### **Auch erhältlich als Spezialvariante: ScarFX® Textil**

Diese Spezialvariante wurde für den großflächigen Einsatz unter Narbenkompressionsbekleidung entwickelt. Der Textilrücken erleichtert das An- und Ausziehen der Kompressionsbekleidung.



Mastopexieversorgung



Brustring

## Oleeva Fabric®

Textilbeschichtetes Silikon-Narbenpflaster

*Oleeva Fabric® Silikon-Narbenpflaster ist effektiv bei hypertrophen Narben. Das Pflaster hilft, das Aussehen von bestehenden Narben sowie von neuen Narben nach Operationen (z. B. Kaiserschnitt, plastischen Operationen) oder Verletzungen zu verbessern.*

### **Merkmale:**

- + die seidige Oberfläche reduziert die Reibung und das Hochrollen der Ecken, wenn es unter Kleidung oder Narbenkompressionsbekleidung getragen wird
- + die Silon-Technologie bietet bemerkenswerte Dehnungs- und Anpassungseigenschaften
- + selbsthaftend für maximalen Tragekomfort
- + wiederverwendbar, haltbar und kostengünstig
- + kombiniert Flexibilität, Waschbarkeit und Haftung auf einzigartige Weise

Die Vielfalt der angebotenen Formen gewährleistet eine passgenaue Versorgung vieler postoperativer Indikationen:

- + allgemeine chirurgische Verfahren
- + Abdominoplastik (Bauchstraffung)
- + Kaiserschnitt
- + Schilddrüsen-OP
- + Areola-Ring
- + vertikale Mastopexie (Brustreduktion, Brustvergrößerung)

Aber auch individuelle Formate können mühelos und passgenau zugeschnitten werden.



## Oleeva Foam®

Schaumstoffbeschichtetes Silikon-Narbenpflaster

*Oleeva Foam® ist ein wirksames, schaumstoffbeschichtetes Silikon-Narbenpflaster. Die Besonderheit dieses Pflasters ist die Beschichtung mit Schaum. Der Schaum verteilt Druck und Kompression gleichmässig auf der Narbe.*

### Merkmale:

- + die Silon-Technologie bietet eine sehr gute Anpassung an schwer zu behandelnde Flächen
- + wiederverwendbar, haltbar und kostengünstig
- + kann zugeschnitten werden
- + ist selbsthaftend

Sobald die Wunde verschlossen ist und die Fäden gezogen wurden, kann mit der Anwendung begonnen werden.

Oleeva Foam® ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann mühelos und passgenau zugeschnitten werden.

Beim Tragen über 24 Stunden täglich wird eine Wechselversorgung mit zwei Streifen empfohlen. Das Pflaster sollte einmal täglich mit nicht rückfettender Seife gereinigt werden.




ScarEsthetique® Narbengel mit Antioxidantien		Art.-Nr.	PZN
30 ml		S60031	115 778 72
60 ml		S60000	061 199 43
ScarSil® Silikon-Narbengel		Art.-Nr.	PZN
10 ml		S85010	17 908 330
15 ml		S85015	09 781 140
30 ml		S85000	029 565 99
ScarFX® Silikon-Narbenpflaster		Art.-Nr.	PZN
3,75 x 7,5 cm		S11503	029 548 38
3,75 x 12,5 cm		S11505	029 548 44
3,75 x 22,5 cm		S11509	029 548 50
2,5 x 30 cm		S10112	029 549 62
2,5 x 55 cm		S10122	029 550 45
7,5 x 12,5 cm		S10305	029 548 67
10 x 20 cm		S10408	029 549 04
25 x 30 cm		S11012	029 549 10
1 Paar Areola-(Mamillen)-Ring		S20000	061 199 66
1 Paar Mastopexie ohne Areola-Ring		S21234	061 199 72
1 Paar Mastopexie mit Areola-Ring		S25678	061 199 89
Vertikale Mastopexie (Lolly)		S13456	182 744 13
ScarFX® Textil		Art.-Nr.	PZN
1 Rolle   15 x 120 cm (zuschneidbar)		S10648	156 317 17
Oleeva Foam®		Art.-Nr.	PZN
4 x 13 cm		BM-3208-1	115 778 89
13 x 13 cm		BM-3225-1	115 778 95
13 x 25 cm		BM-3250-1	118 507 30
20 x 30 cm		BM-3296-1	118 508 13
Oleeva Fabric®		Art.-Nr.	PZN
4 x 7,5 cm		BM-3704-1	182 744 36
4 x 13 cm		BM-3708-1	115 779 03
13 x 13 cm		BM-3725-1	116 162 24
13 x 25 cm		BM-3750-1	116 162 30
20 x 30 cm		BM-3796-1	116 162 47
Oleeva Shapes®		Art.-Nr.	PZN
Kaiserschnitt (5 x 22,5 cm)		BM-37CS-1	115 779 26
Abdominoplastik (5 x 58 cm)		BM-37AP-1	115 779 32
Herz-OP-Versorgung (5 x 20 cm)		BM-37CTS-1	115 779 49
Schilddrüsen-OP-Versorgung (4 x 16 cm)		BM-37TH-1	115 779 55
Vertikale Mastopexie (7,5 x 17 cm)		BM-37VM-1	115 779 78
Areola-Ring (6 cm)		BM-37BA-1	115 779 84


Vertrieb durch: TRICONmed GmbH



 An der Eiche 6, 34327 Körle

 +49 5665 407580

 info@triconmed.de

 +49 5665 4075888

 www.triconmed.de